

## Suturatrice Endoscopica AEON™ Istruzioni per l'uso



**LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.**

Le istruzioni per l'uso possono anche essere trovate su [www.lexington-med.com/IFU](http://www.lexington-med.com/IFU)

**NOTA:** Queste istruzioni per l'uso sono compilate come assistenza all'uso di questo prodotto - non sono un riferimento per le tecniche chirurgiche.

**AVVERTENZA:** L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ viene fornita **STERILE** e deve essere utilizzata **ESCLUSIVAMENTE** in **UNA SINGOLA PROCEDURA**. **ELIMINARE DOPO L'USO**. **NON RIUTILIZZARE**. **NON RISTERILIZZARE**. **NON DECONTAMINARE**.

**AVVERTENZA:** La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ viene fornita **STERILE** ed è intesa **SOLO AL MONOUSO**. **ELIMINARE DOPO L'USO**. **NON RIUTILIZZARE**. **NON RISTERILIZZARE**. **NON DECONTAMINARE**. Riutilizzare, decontaminare o risterilizzare il dispositivo può comprometterne l'integrità e causare lesioni, infezioni o morte del paziente.

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

La Suturatrice Endoscopica AEON™ posiziona due file triple di punti (agrafes) sfalsati in titanio mentre simultaneamente tramite la lama, taglia tra le due file triple di punti sfalsati. La dimensione e la lunghezza della linea dei punti metallici, dipendono dalla selezione della ricarica scelta, in quanto le ricariche sono codificate a colore (2,0mm/30mm, 2,0mm/45mm, 2,0mm/60mm, 2,5mm/30mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/30mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/30mm, 4,0mm/45mm, 4,0mm/60mm, 5,0mm/45mm e 5,0mm/60mm). L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ è adatta per tutte le ricariche Suturatrice Endoscopica AEON™.

L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ e le Ricariche Suturatrice Endoscopica AEON™ da 2,0mm/30mm, 2,0mm/45mm, 2,0mm/60mm, 2,5mm/30mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/30mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/30mm, 4,0mm/45mm e 4,0mm/60mm sono ideate per l'introduzione attraverso un trocar da 12 mm o più grande mediante l'uso di un convertitore.


La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ da 5,0mm/45mm e 5,0mm/60mm deve essere inserita attraverso un trocar da 15mm.


**NOTA:** Quando si utilizza lo strumento con una ricarica da 5,0mm/45mm o 5,0mm/60mm, lo strumento **DEVE** essere inserito in un trocar da 15mm. Un trocar di dimensioni più piccole non è idoneo alla ricarica da 5,0mm/45mm o 5,0mm/60mm.

L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ può essere ricaricata e attivata fino a 25 volte in una singola procedura.

## Suturatrice Endoscopica AEON™

Queste istruzioni per l'uso riguardano i seguenti prodotti:

IMPUGNATURE PER SUTURATRICE ENDOSCOPICA	CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA DELL'ASTA
	AESH060	CORTA (60mm)
	AESH160	MEDIA (160mm)
	AESH260	LUNGA (260mm)
	AETH060	CORTA (60mm)
	AETH160	MEDIA (160mm)
	AETH260	LUNGA (260mm)

RICARICHE SUTURATRICE ENDOSCOPICA	CODICE PRODOTTO	PUNTA DELL'INCUDINE	ALTEZZA DEI PUNTI AGRAFES APERTI	LUNGHEZZA DELLA LINEA DI SUTURA	SPESSORE DEI PUNTI AGRAFES CHIUSI
	AESR30G	Regolare	2,0mm	30mm	0,75mm
	AESR45G	Regolare	2,0mm	45mm	0,75mm
	AESR60G	Regolare	2,0mm	60mm	0,75mm
	AESR30W	Regolare	2,5mm	30mm	1,0mm
	AESR45W	Regolare	2,5mm	45mm	1,0mm
	AESR60W	Regolare	2,5mm	60mm	1,0mm
	AESR30R	Regolare	3,25mm	30mm	1,5mm
	AESR45R	Regolare	3,25mm	45mm	1,5mm
	AESR60R	Regolare	3,25mm	60mm	1,5mm
	AESR30P	Regolare	4,0mm	30mm	1,8mm
	AESR45P	Regolare	4,0mm	45mm	1,8mm
	AESR60P	Regolare	4,0mm	60mm	1,8mm
	AESR45B	Regolare	5,0mm	45mm	2,2mm
	AESR60B	Regolare	5,0mm	60mm	2,2mm
	ASR30GC	Curvo	2,0mm	30mm	0,75mm
	AESC45G	Curvo	2,0mm	45mm	0,75mm
	ASR30WC	Curvo	2,5mm	30mm	1,0mm
	AESC45W	Curvo	2,5mm	45mm	1,0mm
	AESC60W	Curvo	2,5mm	60mm	1,0mm
	ASR30RC	Curvo	3,25mm	30mm	1,5mm
	AESC45R	Curvo	3,25mm	45mm	1,5mm
	AESC60R	Curvo	3,25mm	60mm	1,5mm
	ASR30PC	Curvo	4,0mm	30mm	1,8mm
	AESC45P	Curvo	4,0mm	45mm	1,8mm
	AESC60P	Curvo	4,0mm	60mm	1,8mm
	ASR45BC	Curvo	5,0mm	45mm	2,2mm
	ASR30GS	Corto	2,0mm	30mm	0,75mm
	ASR30WS	Corto	2,5mm	30mm	1,0mm
	ASR60WS	Corto	2,5mm	60mm	1,0mm
	ASR30RS	Corto	3,25mm	30mm	1,5mm
	ASR60RS	Corto	3,25mm	60mm	1,5mm

## Suturatrice Endoscopica AEON™

	ASR30PS	Corto	4,0mm	30mm	1,8mm
	ASR60PS	Corto	4,0mm	60mm	1,8mm

### INDICAZIONI

La Suturatrice Endoscopica AEON™ ha applicazioni in chirurgia generale, addominale, ginecologica, pediatrica e toracica per la resezione, la transezione e la creazione di anastomosi.

**NOTA:** Le Impugnature per Suturatrice Endoscopica AEON™ sono compatibili con le Ricariche Suturatrice Endoscopica AEON™ da 2,0mm/30mm, 2,0mm/45mm, 2,0mm/60mm, 2,5mm/30mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/30mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/30mm, 4,0mm/45mm, 4,0mm/60mm, 5,0mm/45mm e 5,0mm/60mm.

**NOTA:** La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ da 4,0mm/60mm è compatibile con rinforzo bioassorbibile Gore® SeamGuard® per linea di sutura con punti modello 1BSGTRI60P e modello di feltro ad assorbimento poliglicolico Gunze NEOVEIL™ NV-ET-M60A-2.

**NOTA:** La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ da 5,0mm/60mm è compatibile con rinforzo bioassorbibile Gore® SeamGuard® per linea di sutura con punti modello 1BSGTRI60B e modello di feltro ad assorbimento poliglicolico Gunze NEOVEIL™ NV-ET-M60E-2.

**AVVERTENZA: L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ viene fornita STERILE e deve essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE in UNA SINGOLA PROCEDURA. ELIMINARE DOPO L'USO. NON RIUTILIZZARE. NON RISTERILIZZARE. NON DECONTAMINARE.**

**AVVERTENZA: La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ viene fornita STERILE ed è destinata SOLO AL MONOUSO. ELIMINARE DOPO L'USO. NON RIUTILIZZARE. NON RISTERILIZZARE. NON DECONTAMINARE. Il Riutilizzare, decontaminare o risterilizzare il dispositivo può comprometterne l'integrità e causare lesioni, infezioni o morte del paziente.**

**AVVERTIMENTO: Assicurarsi che solo le strutture dei tessuti da tagliare e suturare siano all'interno delle ganasce della suturatrice. La transezione involontaria di altri tessuti può risultare in lesioni, infezioni o morte del paziente.**

### CONTROINDICAZIONI

- 1) La Suturatrice Endoscopica AEON™ e' controindicata per l'uso sul cuore, sistema circolatorio centrale, o il sistema nervoso centrale.
- 2) Non utilizzare la Suturatrice Endoscopica AEON™ compunti da 2,0 mm sull'aorta, su tessuti che si comprimono con uno spessore inferiore a 0,75 mm o su qualsiasi tessuto che non si comprime facilmente pari a 0,75 mm.
- 3) Non utilizzare la Suturatrice Endoscopica AEON™ compunti da 2,5 mm sull'aorta, su tessuti che si comprimono con uno spessore inferiore a 1,0 mm o su qualsiasi tessuto che non si comprime facilmente pari a 1,0 mm.
- 4) Non utilizzare la Suturatrice Endoscopica AEON™ compunti da 3,25 mm sull'aorta, su tessuti che si comprimono con uno spessore inferiore a 1,5 mm o su qualsiasi tessuto che non si comprime facilmente pari a 1,5 mm.

## Suturatrice Endoscopica AEON™

- 5) Non utilizzare la Suturatrice Endoscopica AEON™ compunti da 4,0 mm sull'aorta, su tessuti che si comprimono con uno spessore inferiore a 1,8 mm o su qualsiasi tessuto che non si comprime facilmente pari a 1,8 mm.
- 6) Non utilizzare la Suturatrice Endoscopica AEON™ compunti da 5,0 mm sull'aorta, su tessuti che si comprimono con uno spessore inferiore a 2,2 mm o su qualsiasi tessuto che non si comprime facilmente pari a 2,2 mm.
- 7) La Suturatrice Endoscopica AEON™ non deve essere utilizzata su tessuti in cui la comprimibilità del tessuto potrebbe essere distruttiva, come il fegato o la milza.
- 8) Non utilizzare la Suturatrice Endoscopica AEON™ dove l'emostasi non possa essere verificata visualmente dopo l'applicazione.

### **AVVERTENZE**

- 1) L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ viene fornita STERILE ed è INTESA SOLO PERIL MONOUSO. ELIMINARE DOPO L'USO. NON RIUTILIZZARE. NON RISTERILIZZARE. NON DECONTAMINARE.
- 2) La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ è fornita STERILE ed è INTESA SOLO PERIL MONOUSO. ELIMINARE DOPO L'USO. NON RIUTILIZZARE. NON RISTERILIZZARE. NON DECONTAMINARE. Verificare lo spessore del tessuto prima di applicarvi la suturatrice. Tessuto troppo spesso o sottile può causare una formazione di punti non soddisfacente.
- 3) La suturatrice taglierà e suturerà qualsiasi tessuto, vaso o altra struttura inclusa nelle ganasce. Assicurarsi che solo le strutture tissutali da tagliare e suturare siano all'interno delle ganasce della suturatrice.
- 4) Assicurarsi che il tessuto non si sia esteso oltre il ferma-tessuto prossimale. Il tessuto forzato nello strumento oltre il ferma-tessuto prossimale può essere sezionato senza suturazione.
- 5) Assicurarsi che nessun ostacolo, come clips chirurgiche, sia presente nelle ganasce della suturatrice prima di chiudere le ganasce e di azionare il dispositivo. L'applicazione di punti su un'ostruzione può causare una transezione incompleta e/o punti incorrettamente formati.
- 6) Assicurarsi che la ricarica della suturatrice sia completamente applicata. L'applicazione incompleta della ricarica risulterà in un taglio incompleto e/o formazione incompleta dei punti, che potrebbe causare un'emostasi inadeguata e/o perdite. Tuttavia, se si riscontra una forza di sparo insolitamente elevata a metà fuoco, prendere in considerazione l'interruzione della sparatoria e il ritiro della ricarica pinzatrice. Una forza di sparo insolitamente alta potrebbe indicare che il tessuto è troppo spesso o che un'ostruzione si trova all'interno delle mascelle.
- 7) Dopo aver azionato la suturatrice, ispezionare sempre la linea di sutura e la zona circostante per emostasi o perdite. Lievi perdite o sanguinamento possono essere controllate mediante elettrocauterizzazione o suture manuali.
- 8) Le procedure endoscopiche che utilizzano questo dispositivo devono essere eseguite solo da medici con adeguata formazione in relazione a tecniche chirurgiche endoscopiche.
- 9) Le procedure elettrochirurgiche e laser che comportano l'uso di questo dispositivo devono essere eseguite solo da medici che abbiano ricevuto una formazione adeguata con queste tecniche. Verificare la compatibilità di tutti gli strumenti e degli accessori utilizzati nella procedura per garantire che l'isolamento elettrico o la messa a terra non siano compromessi.
- 10) L'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ viene fornita STERILE ed è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE in una SINGOLA PROCEDURA. La Ricarica Suturatrice Endoscopica AEON™ è fornita STERILE ed è INTESA SOLO PERIL MONOUSO. ELIMINARE DOPO L'USO. NON RIUTILIZZARE. NON RISTERILIZZARE. NON DECONTAMINARE. Il riutilizzo, anche dopo la risterilizzazione, può creare un rischio di contaminazione e causare infezioni nel paziente.

## Suturatrice Endoscopica AEON™


Riutilizzare, riprocessare o risterilizzare il dispositivo può comprometterne l'integrità e causare lesioni, infezioni o morte del paziente.

### **PRECAUZIONI**


- 1) La radioterapia preoperatoria può provocare cambiamenti allo spessore o alla composizione del tessuto. Nella scelta delle dimensioni dei punti, si dovrà considerare qualsiasi trattamento pre-chirurgico subito.
- 2) Qualsiasi tessuto che si estende oltre la linea di taglio non sarà sezionato. Il posizionamento del tessuto in prossimità rispetto al ferma tessuto sulla Ricarica Suturatrice può causare il malfunzionamento della suturatrice.
- 3) Assicurarsi che siano presi provvedimenti per il controllo prossimale e distale prima di usare la suturatrice sui vasi principali.
- 4) Se si utilizza un rinforzo, includere sempre lo spessore combinato di entrambi i tessuti e il materiale di rinforzo nello scegliere la corretta Ricarica Suturatrice.
- 5) Non superare 25 attivazioni per una singola Impugnatura per Suturatrice durante una singola procedura. Il superamento del limite di attivazione dell'Impugnatura per Suturatrice può causare il malfunzionamento del dispositivo.
- 6) Non utilizzare la suturatrice su tessuto ischemico o necrotico.

# Suturatrice Endoscopica AEON™

## SCHEMA DELL'IMPUGNATURA PER SUTURATRICE

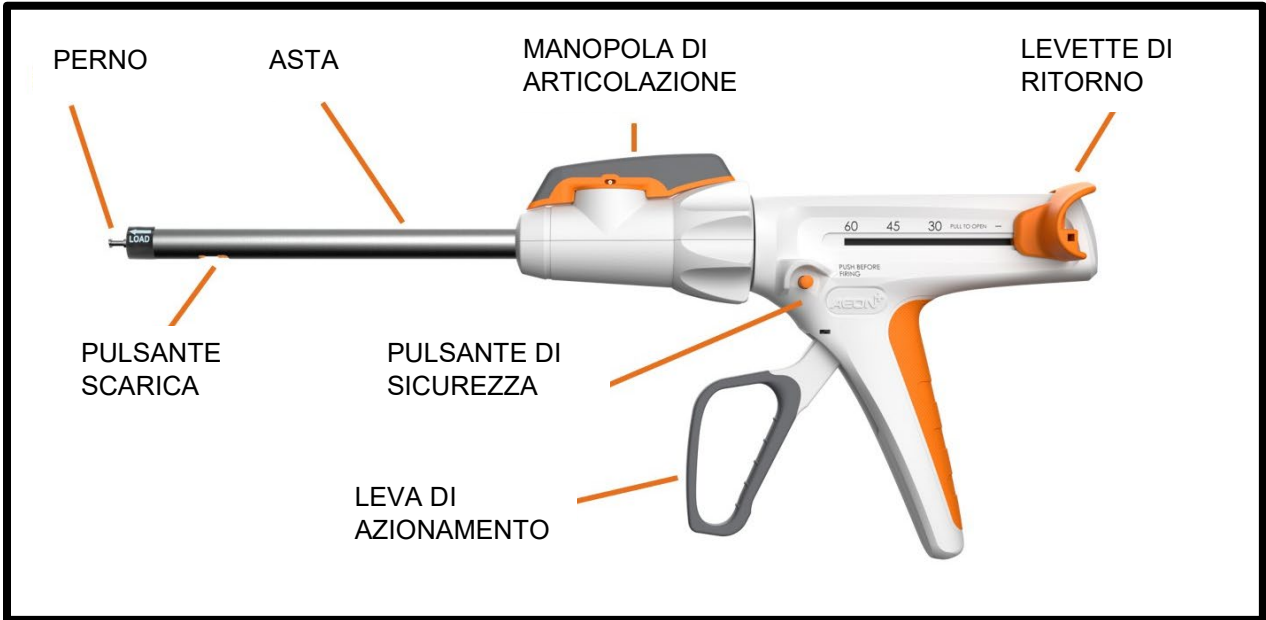

## SCHEMA DELLA RICARICA SUTURATRICE:

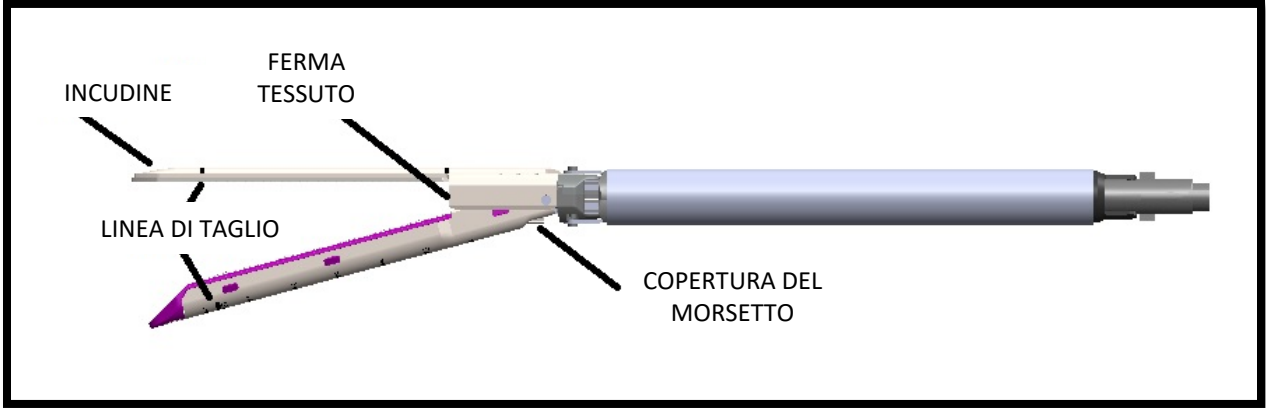

## ISTRUZIONI SUL CARICAMENTO

**AVVERTENZA:** Selezionare una Ricarica Suturatrice con le dimensioni appropriate dei punti per lo spessore del tessuto. Un tessuto troppo spesso o sottile può causare una formazione di punti insoddisfacente. Se si utilizzano vestine, considerare sempre lo spessore combinato di entrambi i tessuti e il materiale di rinforzo prima di scegliere la corretta Ricarica Suturatrice.

**NOTA:** Non tentare di rimuovere il sigillo giallo/arancione dalla Ricarica Suturatrice fino a quando quest'ultima non è caricata sull'Impugnatura per Suturatrice. La rimozione del sigillo dalla Ricarica Suturatrice prima che sia caricata sull'Impugnatura per Suturatrice può causare il malfunzionamento del dispositivo.

**NOTA:** Se presente, rimuovere il cappuccio protettivo dalla parte distale dell'Impugnatura per Suturatrice prima dell'uso.

- 1) La Ricarica Suturatrice è confezionata in posizione aperta - non tentare di chiudere le ganasce della suturatrice.
- 2) Se presente, rimuovere il cappuccio protettivo dalla parte distale dell'Impugnatura per Suturatrice.
- 3) Assicurarsi che le Levette di Ritorno sul dispositivo siano completamente ritratte in posizione prossimale e che la manopola di articolazione sia centrata sul dispositivo.
- 4) Per caricare la Ricarica Suturatrice, allineare prima la freccia di caricamento dell'estremità distale dell'Impugnatura per Suturatrice con la freccia di caricamento all'estremità prossimale della Ricarica Suturatrice.
- 5) Con le frecce di caricamento allineate, inserire la Ricarica Suturatrice sul perno che si estende dall'estremità distale dell'Impugnatura per Suturatrice.
- 6) Ruotare la Ricarica Suturatrice in senso orario di circa 45° per bloccare in posizione.

**NOTA:** Rimuovere il sigillo giallo/arancione prima di chiudere le ganasce della suturatrice.

- 7) Rimuovere il sigillo giallo/arancione dalla Ricarica Suturatrice prima di confermare il corretto caricamento e l'inserimento del dispositivo nel trocar.
- 8) Per confermare il corretto caricamento, premere completamente una volta la Leva di Azionamento della suturatrice per chiudere le ganasce. Ritrarre le Levette di Ritorno e verificare che le ganasce della suturatrice si aprano completamente.

## ISTRUZIONI PER LO SCARICAMENTO

- 1) Per scaricare la Ricarica Suturatrice dall'Impugnatura per Suturatrice, le Levette di Ritorno sull'Impugnatura per Suturatrice devono essere completamente ritratte in posizione prossimale e la Manopola di Articolazione deve essere centrata sul dispositivo.
- 2) Per scaricare la Ricarica Suturatrice, attivare il Pulsante di scarica sull'estremità distale dell'Impugnatura per Suturatrice facendo scorrere in posizione prossimale, verso l'operatore.
- 3) Mentre si tiene premuto il pulsante di scarica nella posizione prossimale, ruotare la Ricarica Suturatrice di circa 45° e tirare in modo distale finché non si sgancia dall'Impugnatura per Suturatrice.
- 4) Rilasciare il pulsante di scarica.

## ISTRUZIONI PER L'USO

**NOTA:** Assicurarsi che le ganasce della suturatrice vengano chiuse prima di introdurre la suturatrice nel trocar.

- 1) Premere una volta la Leva di Azionamento della suturatrice per chiudere le ganasce prima di inserirle nel trocar.
- 2) Inserire la suturatrice in un trocar di dimensioni appropriate e aprire le ganasce della suturatrice ritraendo completamente le levette di ritorno nella posizione prossimale.

**NOTA:** L'incudine della suturatrice deve essere completamente visibile oltre l'estremità distale del trocar prima di aprire le ganasce all'interno della cavità corporea.

**NOTA:** Non premere la Leva di Azionamento della suturatrice mentre si ritraggono le levette di ritorno.

L'asta dell'Impugnatura per Suturatrice Endoscopica AEON™ può ruotare 360° in entrambe le direzioni. È possibile articolare le ganasce della Ricarica Suturatrice fino a circa 45° in entrambe le direzioni sinistra-destra utilizzando la manopola di articolazione.

- 3) Applicare le ganasce della Ricarica Suturatrice sul tessuto da sezionare. Il dispositivo non taglierà il tessuto oltre la linea di taglio indicata su entrambi i lati delle ganasce. Per i tessuti che superano la lunghezza della linea di sutura (30 mm, 45 mm o 60 mm) potrebbe essere necessaria l'applicazione di più cariche suturatrice. Per le ricariche con punta curva, applicare solo su strutture che non si estendono oltre la linea di taglio.
- 4) Chiudere le ganasce del dispositivo attraverso il tessuto da transezionare attivando la Leva di azionamento a fine corsa. Le ganasce possono essere riposizionate, se necessario, ritraendo le Levette di Ritorno in direzione prossimale per aprire le ganasce, riposizionando e premendo la Leva di azionamento per chiudere le ganasce.

**AVVERTENZA:** Assicurarsi che solo le strutture tissutali da tagliare e suturare siano all'interno delle ganasce della suturatrice. La transezione involontaria del tessuto può risultare in lesioni, infezioni o morte del paziente.

**AVVERTENZA:** Assicurarsi che nessun ostacolo, come clip chirurgiche, sia presente nelle ganasce della suturatrice prima di chiudere le ganasce e di azionare il dispositivo. L'applicazione di punti su un'ostruzione può causare una transezione incompleta e/o punti incorrettamente formati.

**AVVERTENZA:** Assicurarsi che il tessuto non sia esteso oltre il ferma tessuto in posizione prossimale. Il tessuto forzato nello strumento oltre il ferma tessuto potrebbe essere sezionato senza suturazione.

**ATTENZIONE:** Qualsiasi tessuto che si estende oltre la linea di taglio non sarà transezionato. Posizionare tessuti in prossimità rispetto al ferma tessuto (sulla ricarica) può causare il malfunzionamento della suturatrice.

- 5) Dopo aver chiuso le ganasce sul tessuto da transezionare, il pulsante di sicurezza può essere attivato premendolo da entrambe i lati dell'impugnatura per suturatrice prima di azionarla. Lasciare che il tessuto si comprima adeguatamente prima di sparare (attendere circa 15 secondi dopo il bloccaggio può comportare una migliore compressione e formazione di graffette).



## Suturatrice Endoscopica AEON™

- 6) Dopo aver attivato il pulsante di sicurezza, il dispositivo viene attivato premendo la Leva di Azionamento per iniziare la transezione del tessuto mentre contemporaneamente si formano i punti. Premere la Leva di Azionamento in sequenza finché la copertura del morsetto della Ricarica Suturatrice raggiunge l'estremità distale delle ganasce e i fermi della suturatrice. Smettere di premere il grilletto quando viene raggiunta l'estremità distale della ricarica e il grilletto si blocca. Il numero di pressioni sequenziali dipende dalla lunghezza della linea di sutura della Ricarica Suturatrice (30 mm, 45 mm o 60 mm).

### **Se si utilizza l'impugnatura con interruttore modalità "standard/spessa":**

- L'interruttore modalità "standard/spessa" sul lato dell'impugnatura consente all'utente di cambiare il punto di leva del grilletto, che consente al dispositivo di essere sparato con meno forza di innesco.
- L'interruttore modalità "standard/spessa" può essere attivato dopo aver attivato il pulsante di sicurezza or at o in qualsiasi posizione durante lo sparo di ricarica.
- Se il dispositivo è sbloccato e riposizionato, l'interruttore si ripristinerà in modalità "standard" e deve essere attivato di nuovo.
- L'interruttore si ripristina automaticamente in modalità "standard" dopo la retrazione delle levette di ritorno.
- **NOTA:** Se l'interruttore non si ripristina automaticamente dopo il ritiro, non continuare a usare l'impugnatura perché potrebbe verificarsi un malfunzionamento del dispositivo.
- **NOTA:** Non tentare di passare da modalità "spessa" a modalità "standard" durante l'accensione del dispositivo, perché ciò potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

**AVVERTENZA:** Assicurarsi che la Ricarica Suturatrice sia completamente attivata. L'incompleta attivazione della Ricarica può risultare in un taglio incompleto e/o formazione incompleta dei punti, ciò potrebbe risultare in un'emostasi inadeguata e/o perdite.

**NOTA:** Un dispositivo di sicurezza impedisce di azionare due volte una Ricarica Suturatrice. Non disattivare il dispositivo di sicurezza, poiché l'esclusione di questo potrebbe causare il malfunzionamento della ricarica.

- 7) Una volta che il dispositivo è stato completamente azionato, aprire le ganasce ritraendo completamente le levette di ritorno nella posizione prossimale. Rimuovere delicatamente il dispositivo dal tessuto e ispezionare la linea di sutura per l'emostasi.
- 8) Dopo aver rimosso il dispositivo dal tessuto, chiudere le ganasce della suturatrice premendo una volta la Leva di Azionamento tramite una corsa completa e centrando la manopola di articolazione prima di rimuovere il dispositivo dalla cavità corporea.
- 9) Rimuovere il dispositivo dalla cavità corporea e scaricare la Ricarica Suturatrice.
- 10) Smaltire gli strumenti usati in conformità con i requisiti di smaltimento dei rifiuti medici e biologici dell'utente finale.

**NOTA:** Assicurarsi che la manopola di articolazione sia centrata sul dispositivo prima di rimuovere la suturatrice dal trocar.

## Suturatrice Endoscopica AEON™

**AVVERTENZA:** Dopo aver azionato la suturatrice, ispezionare sempre la linea di sutura e la zona circostante per emostasi e/o perdite. Lievi perdite o sanguinamento possono essere controllate mediante elettrocauterizzazione o suture manuali.

**ATTENZIONE:** Non superare 25 attivazioni per una singola impugnatura per suturatrice durante una singola procedura. Il superamento del limite di attivazione dell'impugnatura per suturatrice può causare il malfunzionamento del dispositivo.

**CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A TEMPERATURE ELEVATE.**

### **Per il servizio clienti e la segnalazione di reclami o eventi avversi**

Utilizzare le seguenti informazioni per il servizio clienti, inclusi ordini, segnalazioni di reclami o eventi avversi e informazioni generali.

Lexington Medical, Inc.  
23 Crosby Drive  
Bedford, MA 01730 USA  
Direct: +1.617.209.9817


Suturatrice Endoscopica AEON™



STRUMENTO  
MONOUSO



NON  
RISTERILIZZARE

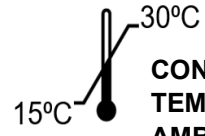

CONSERVARE A  
TEMPERATURA  
AMBIENTE



NON USARE SE  
LA CONFEZIONE  
E' DANNEGGIATA




MANTENERE  
ASCIUTTO



CONSULTARE  
LE ISTRUZIONI  
PER L'USO



SENZE  
LATEX

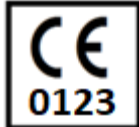


Utilizzo per data



**Fabbricato da:**

Lexington Medical, Inc.  
23 Crosby Drive  
Bedford, MA 01730 USA  
+1.617.209.9817

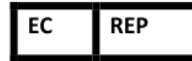

Advena Ltd.  
Tower Business Center  
2<sup>ND</sup> Flr., Tower Street  
Swatar, BKR 4013 Malta

© 2024 LEXINGTON MEDICAL, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.  
Istruzioni per l'uso Etichetta P / N 900298 Rev-X